


# seca 756

Báscula mecánica de columna con indicador del Índice de Masa Corporal (BMI) 



- Cálculo rápido y sencillo del BMI.
- Evaluación simultánea del estado de nutrición.
- Escala circular de clara disposición y plataforma baja.

## seca 756:

### La solución integral inteligente.

Esta pesapersonas de columna, con escala circular, aporta prestaciones inimaginables en otras básculas mecánicas: durante el mismo pesaje determina el Índice de Masa Corporal (BMI), esto es: el estándar homologado por la Organización Mundial de la Salud para el estado de nutrición. Equipándola con el tallímetro seca 224, la báscula de indicador circular llega a transformarse en una estación completamente mecánica de pesaje y medición. Esta elegante solución integral es idónea principalmente en consultorios y hospitales de medicina general, al tiempo que constituye un cómodo instrumento para los profesionales de la salud en todo el mundo. Esta báscula, instalada en farmacias o en gimnasios, ofrece un servicio adicional al cliente.



#### Cálculo y valoración del BMI, con rapidez y facilidad.

¿Falta de peso, peso normal, sobrepeso o adiposidad? A esta pregunta responde seca 756 con una innovadora propuesta mecánica: al poner los pies en la báscula, un "disco BMI" se pone en movimiento bajo el indicador de peso de gran precisión. El disco aparece en una pequeña ventana junto a la escala de la talla. El BMI se puede leer ahora muy fácilmente en la escala de la talla. Las divisiones cromáticas del disco BMI proporcionan información sobre la correcta valoración del BMI, a saber, si se detecta falta de peso, peso normal o sobrepeso. La estatura, si es necesario, se puede comprobar exactamente en un único paso operativo, utilizando el tallímetro telescópico seca 224 integrable opcional. No existe procedimiento más rápido y claro.

#### Escala circular de clara disposición y plataforma baja.


La elegante báscula es resultado de un diseño centrado particularmente en una ergonomía perfeccionada: la escala circular ligeramente inclinada hacia el observador es amplia y está claramente dispuesta, con lo cual se puede leer sin dificultad alguna. La plataforma baja de seca 756 permite acceder a la báscula fácilmente. La amplia plataforma ofrece espacio suficiente para personas altas y obesas. Adicionalmente, el revestimiento de caucho antideslizante de la superficie proporciona un apoyo seguro.

#### Movilidad sobre ruedas de transporte integradas.

Gracias a las ruedas de transporte integradas, la seca 756 se traslada fácilmente, adaptándose rápidamente a los desniveles con los pies niveladores regulables.



El disco BMI con divisiones en colores contrastantes permite comprobar fácilmente el Índice de Masa Corporal.

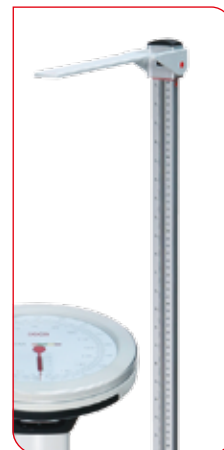

El tallímetro opcional permite realizar el pesaje y la medición en una sola operación.

## seca 756

### Datos técnicos

- Capacidad: 160 kg
- División: 500 g
- Dimensiones (AxAxP): 360 x 1,000 x 628 mm / 14.2 x 39.4 x 24.7"
- Dimensiones plataforma (AxAxP): 335 x 80 x 345 mm / 13.2 x 3.1 x 13.6"
- Peso: 18.5 kg / 40.8 lbs
- Funciones: BMI, ajuste de cero seleccionable
- Opcional: Tallímetro seca 224
- Clase de calibrado: